



アダリー イージー ミルカー 家畜用簡易ミルカー

こんな時に役立ちます！

分娩直後の母親から初乳を搾り、すぐに与えるとき。

将来の使用のために冷凍保存するとき。

乳房炎になった牛/山羊の搾乳をするとき。


起立不能になった牛/山羊の搾乳をするとき。



牛・山羊用


使用方法

- 1 洗浄ペーパーで乳房を拭き、付着した土やバクテリアを除去し、全ての乳頭を少なくとも2回程度、手で搾ってください。

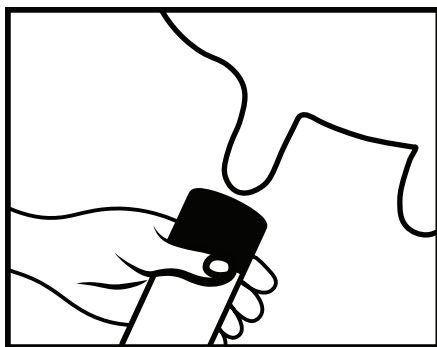


2 優しく装着

乳頭の先を優しく搾乳シリンダーに差し込んでください。

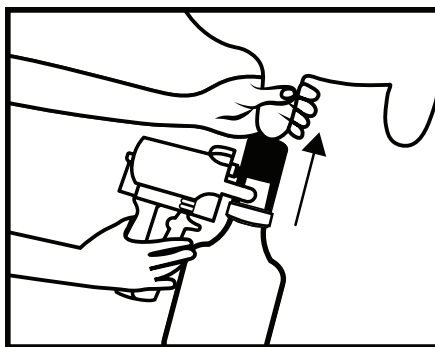

3 真空状態

ハンドルを少なくとも2～3回操作すると、ポンプが働き真空状態になり、乳頭がライナーに装着されます。

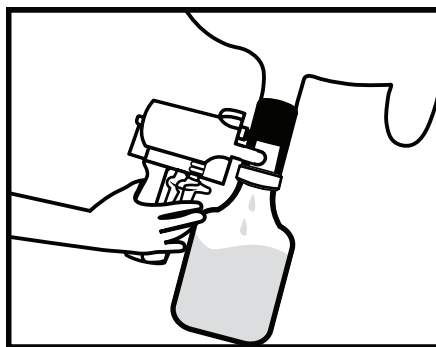

4 搾乳開始

ミルクが出始めたらハンドル操作を止めてください。出が遅くなったり、止まった場合は、再度ハンドル操作をしてください。搾り終わるか、必要量搾ったら、次の乳頭に移ります。

個体によって差はありますが、通常最初の搾乳で200～350ccの初乳が集乳できます。
上記の手順でもミルクが出ない場合は、再度乳房をマッサージして搾乳を行ってください。

5 解除方法

ポンプの真空ロックを解除するには、ボトルの底を持ってポンプの方向に引きライナーと乳頭に隙間を作って空気を入れてください。決してライナーをいきなり乳頭から引き抜かないでください。

6 注意事項

集乳ボトルがあふれないように注意してください。

●ボトル上部の線までミルクを入れてください。

●ミルクが空気抜き穴に流入しないよう、ボトルを傾けず垂直に保ってください。

7 集乳完成

集乳したミルクボトルに乳首を付けて与える、もしくはキャップをして凍結保存してください。

この際、忘れずに名号と集乳日をラベルに記載してください。

株式会社 野澤組 畜産部

E-mail: livestock-2@nosawa.co.jp

本社 畜産部 〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-5-2(東宝日比谷プロムナードビル)

電話:03-3528-8107 FAX:03-3528-8126

北海道営業本部 〒080-0048 北海道帯広市西18条北1-1-2

電話:0155-67-5025 FAX:0155-67-6207

九州営業所 〒862-0954 熊本県熊本市中央区神水2-10-7(光永ビル403号)


電話:096-381-3914 FAX:096-381-3841

仙台営業所 〒980-0002 宮城県仙台市青葉区福沢町3-37(蟬林館103号)

電話:022-397-9781 FAX:022-397-9782



製品構成

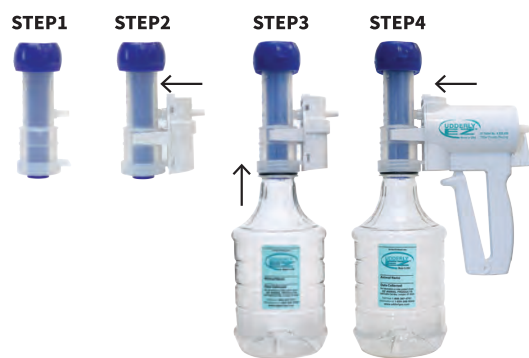

組み立て方法

- STEP1** ライナーを搾乳シリンダーに差し込んでください。
- STEP2** 搾乳シリンダーをコネクターにはめ込んでください。
- STEP3** 集乳ボトルにOリングのパッキンが付いていることを確認し、空気が漏れないように搾乳シリンダーに集乳ボトルを装着してください。
- STEP4** コネクターにポンプハンドルをはめ込んでください。

セット後、手のひらをライナーに押し当てハンドルを操作し、真空状態になっていることを確認してください。

洗浄方法

- ① 使用後は毎回必ず洗浄してください。各パーツは簡単に取り外せるので、容易に洗浄できます。
- ② 搾乳シリンダーと集乳ボトルは温めた洗浄液に浸してください。洗浄液には消毒剤か洗浄剤又は少量の塩素殺菌剤が漂白剤を加えます(水:漂白剤=1:1以下)。
- ③ 洗浄後、十分に濯いで乾燥させてください。ポンプハンドル部分は布などで拭いてください。

取扱について

- ① 集乳ボトルは絶対に煮沸しないでください。
- ② 食洗器で洗浄しないでください。
- ③ 集乳ボトル洗浄後、Oリングを忘れずに装着してください。
- ④ もしポンプにミルクが流入した場合、すぐに洗浄してください。
真空口を少なめの石鹼液かpH7-8の洗浄液に浸してください。ハンドルを操作して洗浄液をポンプの中へ吸入させ、流入したミルクを完全に除去してから外部を拭き取り、内部は空気を送って乾燥させてください。
- ⑤ ミルクで汚れたポンプを放置しないでください。特に初乳はポンプのパーツを痛める可能性が高く、スプーン2杯分の重曹をぬるま湯に溶かしてよくすすいで乾燥させてください。
- ⑥ 初乳を解凍する際は、温水にボトルを浸してゆっくりと解凍してください。初乳中の抗体を破壊してしまうため、絶対に電子レンジを使用しないでください。